-* Hanger Clinic

Protector AmpuShield®: guía de uso y cuidados



Tras la cirugía de amputación, es muy importante proteger el muñón y evitar caídas. Las caídas pueden hacer que la sutura (los puntos) se abra, lo cual retrasa la curación. El protector AmpuShield[®] le ayuda a evitar lesiones y disminuir la inflamación durante la recuperación postoperatoria, además de prepararlo para la prótesis.

_			
00110			USHIELD
(' () N/I ()			
	UJAR	LL AIVIE	

COMO OSAR EL AMPOSHIELD	
El médico, enfermero, protesista o terapeuta le darán instrucciones específicas, pero abajo le damos algunas pautas generale	s:
1. Antes de colocarse el protector, siempre aplique al menos un encaje y	
2. Centre el protector en la extremidad y ajuste las correas, pero no demasiado. Ajuste el protector solo como se lo indiquen.	
3. Lleve puesto el protector: De manera continua, durante horas por día.	
4. Haga tres descansos diarios. Mientras esté sentado o en la cama, quítese el protector, examine si tiene drenaje excesivo piel irritada, flexione la pierna, y vuelva a colocárselo después de unos minutos.	0 (

- **5.** Si el médico le indicó un reductor, llévelo en todo momento, incluso cuando se quite el protector.
- 6. No ponga peso en la extremidad, a menos que se lo indique el médico.

MANEJO DEL DOLOR

Es normal sentir algo de dolor tras la amputación. El AmpuShield® debería quedarle cómodo y no causarle más dolor. Si la extremidad se calienta mucho o si la herida late o duele, dígaselo al enfermero o al médico.

INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA



- Limpie el protector con un paño suave o una esponja embebidos en alcohol o en agua y jabón (no sumerja el protector en el agua). Séquelo por completo antes de colocárselo.
- Lave la almohadilla distal con agua y jabón; estrújela para sacar el exceso de agua. Esta almohadilla puede colocarse en una bolsa plástica cuando la use.

CUIDADO DE LA PIEL

Comuníquese con su médico, enfermero, protesista o terapeuta si tiene inquietudes sobre dolor, sangrado, problemas de la piel o el uso de este dispositivo.



- Inspeccione la extremidad todos los días. Dígales al enfermero o al médico si ve ampollas, llagas, úlceras, granos o cortes.
- Mantenga limpia la extremidad y aplique un encaje limpio todos los días. Masajee la extremidad con regularidad, según se lo indiquen.
- · No use lociones ni limpiadores a base de alcohol. No se afeite la extremidad ni se quite ninguna costra.
- · Mantenga el vendaje de gasa sobre la herida quirúrgica en todo momento y hasta que se cure por completo.

La próxima cita es el:	Su protesista:	
Dirección de la clínica:	Teléfono:	

A medida que avanza en el camino, recuerde que no está solo. El profesional clínico está disponible para responder sus preguntas y apoyarlo en todo lo que pueda.



MIRE EL VIDEO EDUCATIVO





Visite HangerClinic.com/AmpuShield para informarse más.





